

RUO

SARS-CoV-2 抗原検査キット

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card



20 tests/kit



Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Cardは、ヒトの鼻、鼻咽頭、または中咽頭から採取した検体に存在するSARS-CoV-2抗原を定性的に検出するための検出キットです。

特長

- ▶ サンプルの多種性:
鼻、鼻咽頭、中咽頭から採取したスワブ検体で測定が可能
- ▶ 判定時間: 15分
- ▶ 優れたパフォーマンス性能:

99.07%

Specificity

96.49%

Sensitivity

98.62%

Accuracy

パッケージ	20テスト
テストタイプ	定性試験
必要器具	なし
対象サンプル	鼻、鼻咽頭、中咽頭
測定時間	15分
特異性	99.07%
感度	96.49%
保管温度	2-30°C

コードNo	品名	容量	価格
4114A-020	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	20 Tests	29,000

※1test毎に個包装も対応可能



株式会社エムピーバイオジャパン

〒103-0013


東京都中央区日本橋人形町 3-7-14

セブンビル401号

TEL 03-6667-0730 FAX 03-6667-0733


測定方法

▶ 検体の準備

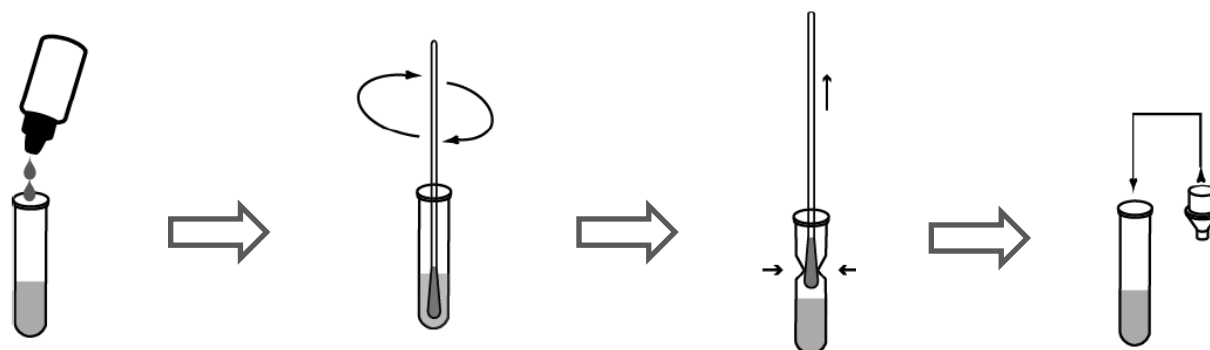

1. 抽出チューブにバッファーを8滴(約0.25 mL)を加えます。
2. 検体のついたスワブを抽出チューブに入れます。スワブを3~5回回転させ、バッファーに1分間置きます。
3. 抽出チューブを指でつまんで、可能な限り綿棒から溶液を取り除きます。
4. ノズルキャップをサンプル抽出チューブにしっかりと取り付け試験用検体として抽出液を使用します。

▶ 実験手順

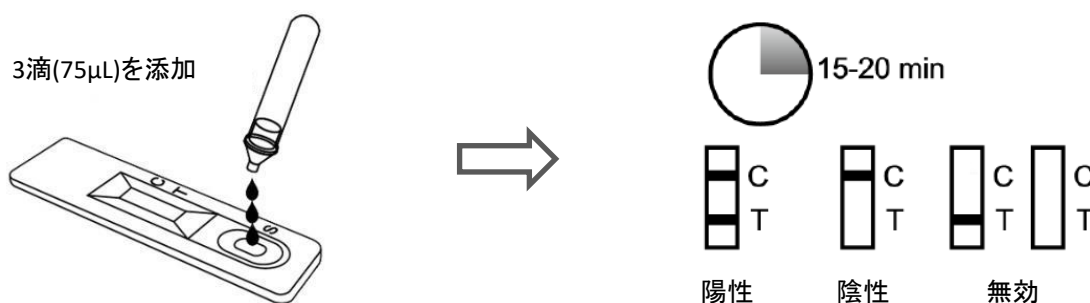

1. テストをする前に、キットを室温に戻します。開封後は、すぐに使用してください。
2. 試験用検体(抽出液)を3滴(75 µL)検体ウェル(S)に加えます。
3. 15~20分で結果を読みます。注: 20分以降の結果は正確でない場合があります。


【使用上の制限】

- 本製品は研究用に限定して販売しております。
- 本製品の陽性結果は、SARS-CoV-2 感染の可能性を示しますが、感染の判定については他の判定方法と併せて総合的にご判断ください。
- 本製品の陰性結果は、SARS-CoV-2 による感染の可能性を排除するものではありません。

【お問合せ先】

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL: 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL: 03-3270-8571 (代表)

 フリーダイヤル 0120-052-099

試薬 URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

E-mail: ffwk-labchem-tec@fujifilm.com

営業所: 九州・中国・東海・横浜・筑波・東北・北海道